

Decūs




**Dreilagige
Schaumstoff-
matratze zur
Dekubitusprophylaxe
und -therapie**

Elastisch – Formbeständig – Komfortabel – Wirtschaftlich


- Ausgezeichnete Ergebnisse bei der Druckentlastung dekubitusgefährdeter Patienten
- Das viskoelastische, thermoplastische Material garantiert Patientenkomfort
- Bi-elastischer, atmungsaktiver Bezug aus Polyurethan
- Schadstoffgeprüfte Textilien, ausgezeichnet mit dem ÖKOTEX-STANDARD 100
- Matratze und Schutzbezug sind mikroklimatisch ideal aufeinander abgestimmt.

Drei unterschiedliche Schaumstoffqualitäten ergänzen sich sinnvoll in der Wirkung

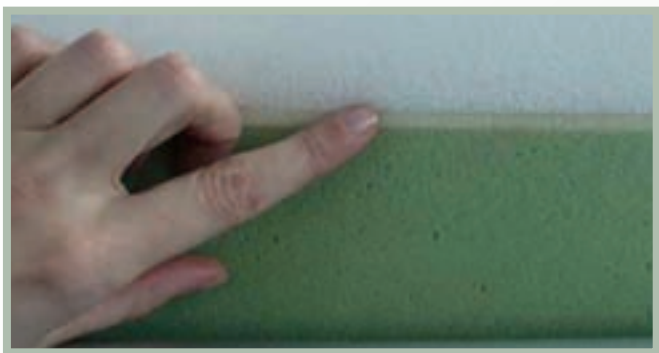

- Die 5,5 cm dicke obere Schicht aus weißem, viskoelastischem Schaumstoff mit „Memory-Effekt“ nimmt den Körper sanft auf, so wird die Auflagefläche deutlich vergrößert und der Auflagedruck verringert.
- Die festere, 0,5 cm dicke mittlere Schicht verteilt den Druck und sorgt für Formbeständigkeit.
- Die weiche, 8 cm dicke untere Schicht aus grünem Polyurethan-Schaumstoff nimmt den Druck auf und verhindert das Durchliegen.
- Die hochwertigen Schaumstoffe sind ermüdungsfrei und deshalb besonders langlebig bei gleichbleibender Formbeständigkeit. Alle Materialien sind schwer entflammbar und wurden nach EN 597-1 und EN 579-2 geprüft.

Effektive Druckentlastung

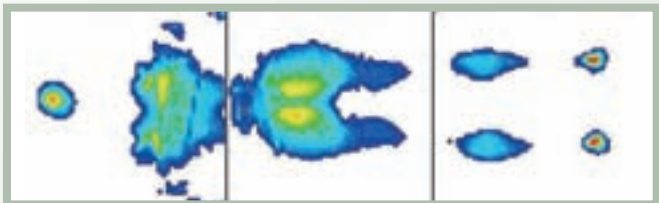

Auflagedruckmessungen mit dem X-Sensor-System bestätigen die wirksame Druckentlastung zur Prävention von Druckgeschwüren. Testperson männlich, 1,70 cm, 70 kg

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (LxBxH) :	200 x 90 x 14 cm (Standardmatratze)
Gewicht:	ca. 13,5 kg
Stauchhärte:	2,4 kPa
Durchschnittl. Raumgewicht:	52,8 kg/m ³
Sonderanfertigungen sind möglich.	

Schaumstoff FCKW-frei geschäumt
Hilfsmittel-Katalog-Nr. 11.11.03.5103



gemäß Richtlinie 93-42 EWG



Hochwertiger Bezug



- Der bi-elastische, antibakteriell behandelte Bezug aus Polyurethan ist abwasch- und desinfizierbar und kann bei Temperaturen bis zu 95° C gewaschen werden.
- Das atmungsaktive, wasserdichte Material bietet kaum Reibungswiderstand und sorgt durch die hautsympathische Oberfläche für hohen Liegekomfort. Geeignet auch bei Inkontinenz und starkem Schwitzen.
- Durch den stabilen Reißverschluss über drei Seiten ist der Bezug problemlos zu wechseln.

Das Bett stellte uns freundlicherweise die Firma Wissner-Bosserhoff, Wickede, zur Verfügung.



Ebenfalls verfügbar:

Decus-Sitzkissen (einlagig) Hilfsmittel-Katalog-Nr. 11.11.01.3112
damit Dekubitusprophylaxe nicht an der Bettkante aufhört.
Viskoelastischer Schaumstoff, Standardmaß: 45 x 45 x 8 cm

Decus-OP-Auflage (einlagig)
Dekubitusprophylaxe im Operationsbereich.
Viskoelastischer Schaumstoff, Standardmaß: 200 x 60 x 7 cm

Decus-Matratzenauflage (einlagig)
Viskoelastischer Schaumstoff, Standardmaß: 200 x 90 x 6 cm

Technische und farbliche Änderungen behalten wir uns vor.

GerroMed Pflege- und Medizintechnik GmbH & Co. KG

Fangdieckstraße 75b · 22547 Hamburg · Tel. 040 - 54 73 03-0 · Fax 040 - 54 73 03-33 · E-Mail mail@gerromed.de

www.gerromed.de

Wir sind zertifiziert nach DIN EN ISO 9002 und DIN EN ISO13488

