

# noDEC E



**Wenn  
Leistung und  
Patienten-  
komfort  
zählen**

- Regelmäßige Druckentlastung zur effektiven Dekubitusprophylaxe bei Patienten mit hohem bis sehr hohem Risiko
- Wirksame Therapie bestehender Druckgeschwüre bis Grad IV bei gleichzeitigen Lagerungsmaßnahmen
- Wahlweise Wechseldruck oder statischer Betrieb
- Hoher Liegekomfort durch zweilagigen Aufbau
- Leichte Handhabung, rasche Installation, ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis

**GerroMed**

*...viel mehr als „Ein Produkt“!*

## Matratze/Bezug



- Die alternierende Wechseldruckfunktion in den 18 oberen Quersellen garantiert wirksame Druckentlastung bis zu einem Patientengewicht von 220 kg
- Die darunter liegenden in 3 Zonen geteilten 7 Längszellen verbessern die Anpassung an das Bett und erhöhen den Komfort für den Patienten
- Der spezielle Matratzenaufbau mit höheren Außenzellen bietet mehr Sicherheit und Seitenstabilität
- Durch Wahl des statischen Modus wird die Einschlaf- und Ruhephase des Patienten unterstützt; nach zwei Stunden automatische Rückstellung auf Wechseldruck
- Der hautfreundliche bi-elastische Bezug aus PU-beschichtetem Polyester ist bis 90°C waschbar und mit allen gängigen Flächendesinfektionsmitteln desinfizierbar
- Durch den rundum verlaufenden Reißverschluss wird der Bezug problemlos zum Waschen abgenommen

## Aggregat



- Display-Anzeige der Betriebsart
- Alarm (optisch und akustisch) für Niederdruck, Überdruck und bei Stromausfall
- Automatische Druckeinstellung auf das jeweilige Patientengewicht
- Mikroprozessorgesteuert, verschleißarm und wartungsfreundlich
- Leicht bedienbar
- Besonders leise

## CPR



- Einfache, effektive Schnellentlüftung durch das bewährte NoDec CPR-Ventil

## TECHNISCHE DATEN

### Matratze

Abmessungen: 190 x 90 x 23 cm (LxBxH)  
Material: Polyester mit Polyurethan  
Gewicht: 7,5 kg  
Patientengewicht: bis 220 kg

### Aggregat

Abmessungen: 48 x 15 x 30 cm (LxTxH)  
Gewicht: 5,5 kg  
Zyklusdauer: 10 Minuten  
Netzanschluss: 230 V / 50 Hz  
Stromaufnahme: 30 W



Technische und farbliche Änderungen behalten wir uns vor.