

# noDEC P



**Die „Null-  
Druck-Lösung“  
mit neuer  
Funktionalität  
und  
Technologie!**

- zur Dekubitus-Prophylaxe bei Höchstisikopatienten und zur wirksamen Therapie bereits bestehender Druckgeschwüre aller Stadien
- mit allen Vorteilen der regelmäßig wiederkehrenden vollständigen Druckentlastung (Seiler's 1. Therapieprinzip)
- Reaktive Hyperämie zur Unterstützung des Heilungsprozesses
- Komforteinstellung fest – medium – weich


# Drei Therapien – ein Gerät: NoDec P



## Stabilität

Zwei innenliegende Längszellen sorgen für seitliche Stabilität des Patienten.  
Das doppellagige Matratzensystem mit seinem Drei-Kammer-Zyklus sorgt dafür, dass auch bei Schwerstpatienten bis 250 kg kein Durchliegen oder -sitzen möglich ist.

Die einzigartige Dynamik des Auffüllens und Entleerens der Zellen erzeugt rhythmische Luftwellen.

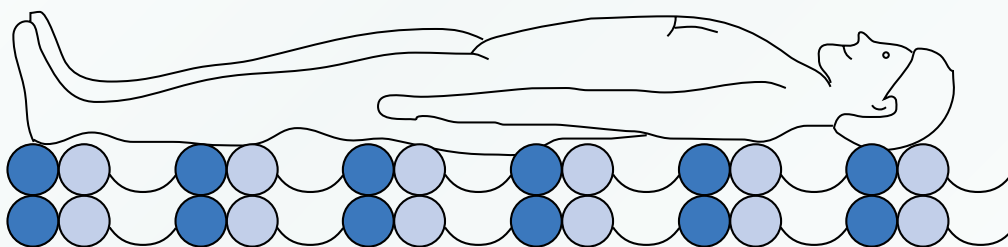

## Anwenderkomfort



Neueste Techniken, mit Displayanzeige, sorgen für eine komfortable und sichere Anwendung.  
Per Knopfdruck ist die Betriebsart von **Dynamisch** auf **Statisch** mit einer jeweils individuellen Komfort-Einstellung **Fest, Medium** oder **Weich** wechselbar.  
Maximale Füllung für pflegerische Maßnahmen.  
Automatische Matratzenentleerung. Transportmodus.

## Matratzenaufbau

Der spezielle Matratzenaufbau mit zwei innenliegenden Längszellen sorgt für seitliche Stabilität des Patienten.  
Jeweils drei nebeneinanderliegende Luftzellen werden synchron mit den drei darunterliegenden Luftzellen im Zyklus von 15 Minuten mit Luft gefüllt und wieder entleert.  
Dadurch wechseln die Auflagepunkte des Körpers.  
Auf den entleerten Zellen (in der Grafik weiß dargestellt) besteht Null-Auflagedruck, der alle 5 Minuten die nächste Zelle erreicht.

## Matratzenlänge



Durch einfaches Umlegen von zwei Ventilen kann die Matratze von 200 cm auf 210 cm verlängert werden.



„Im Falle eines Falles“ ist eine Schnellentlüftung der Matratze mittels eines völlig neuentwickelten CPR-Ventils möglich.

## TECHNISCHE DATEN

### Aggregat:

Abmessungen (B x H x T)	48 x 30 x 13 cm
Gewicht	7,7 kg
Netzanschluß	230 Volt / 50 Hz
Stromaufnahme	50 Watt
Zyklusdauer	15 Minuten
Zykluskontrolle	Mikroprozessor-gesteuerte pneumatische Schalterbetätigung
Geräuschpegel	ca. 30 dB (A)

### Matratze:

Abmessungen (L x B x H)	210 x 90 x 23 cm / 200 x 90 x 23 cm
Gewicht	8,2 kg
Patientengewicht	30 - 250 kg
Anzahl der Luftkammern	20
(davon 1 Zelle ablassbar)	



Technische und farbliche Änderungen behalten wir uns vor.

**GerroMed** Pflege- und Medizintechnik GmbH & Co. KG

Fangdieckstraße 75b · 22547 Hamburg · Tel. 040 - 54 73 03-0 · Fax 040 - 54 73 03-33 · E-Mail mail@gerromed.de  
[www.gerromed.de](http://www.gerromed.de)

Wir sind zertifiziert nach DIN EN ISO 13485

